


**SIMRIS-VIARPS**  
BYALAG

# HJÄRTSTARTARE i Simris








**SIMRIS-VIARPS**  
BYALAG

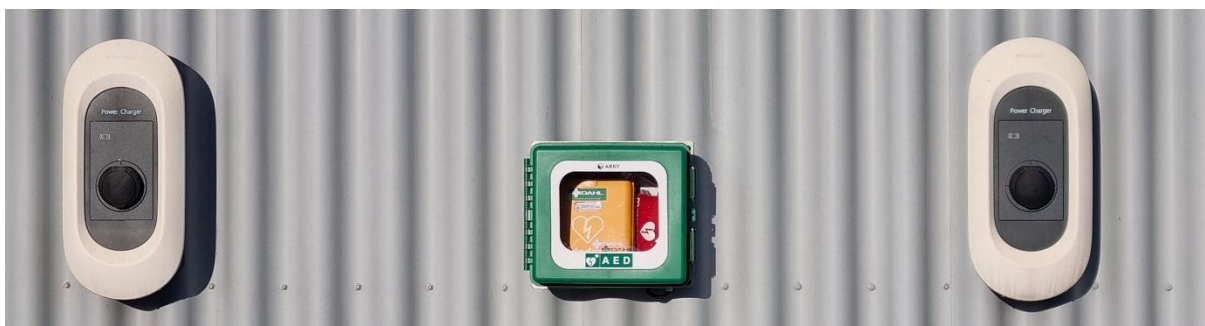Tack vare ett bidrag från Sparbanken Syd har en **hjärtstartare** kunnat köpas in och monteras utomhus, i ett värmeskåp, i Simris by. Den finns monterad på verkstadsdelen av **Rogers bilfirma** mellan de två elbilsladdarna som kan ses på bilderna nedan.



# SNABBHANDBOK
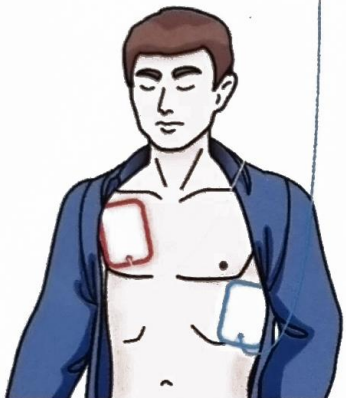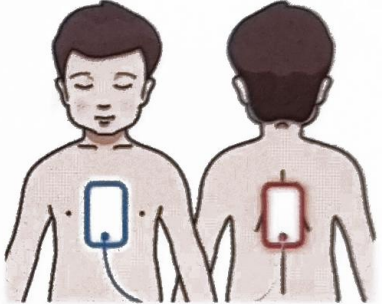
<p><b>1</b></p>  <p>Kontrollera att patienten är okontaktbar och inte andas eller endast flämtar. <b>RING AMBULANS!</b></p>	<p><b>2</b></p>  <p>Öppna AED-enhetens lock.</p>
<p><b>3</b></p> <p>Sätt fast elektroderna.</p> 	
<p><b>4</b></p> <p>Administrera en stöt.</p>	<p><b>Om stöt rekommenderas</b></p> <p>Helautomatisk modell: AED-enheten ger automatiskt patienten en stöt.</p> <p>Halvautomatisk modell: Tryck på stötknappen inom 30 sekunder.</p>  <p><b>Om stöt inte rekommenderas</b></p> <p>Utför hjärt-lungräddning enligt anvisningarna.</p>

# HANDBOK

## 1 Bedöm patientens tillstånd




Kontrollera att båda följande tillstånd gäller för patienten:

- Är medvetslös
- Andas inte eller andas inte normalt

### RING AMBULANS

## 2 Starta utrustningen

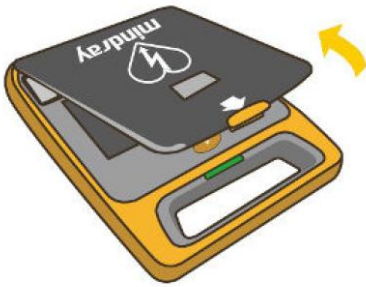


Öppna locket

Du hör:

🔊 "Påslagen. Behåll lugnet."

Följ instruktionerna

## 3 Kontrollera patientkategorin

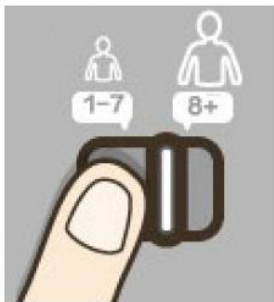

Tryck lägesomkopplaren för vuxen/barn till vänster eller höger. Förinställt för vuxen (höger).


För vuxen: 8 år eller äldre eller över 25 kg

🔊 "Vuxenläge"

För ett barn: under 8 år eller under 25 kg

🔊 "Barnläge"

## 4 Förbered patienten

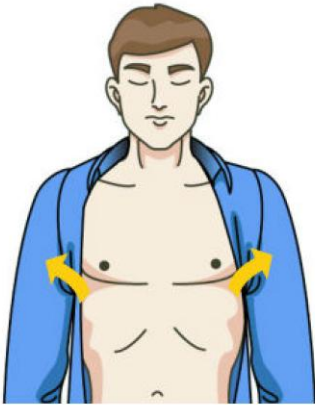


Exponera patientens bara bröstorg:

- Kontrollera att patientens hud är ren och torr
- Torka patientens bröstorg och raka bort hår om det behövs.

») "Ta av kläderna från patientens bröstorg. Sätt fast elektroderna enligt anvisningarna på elektroderna."

## 5 sätt fast elektroderna

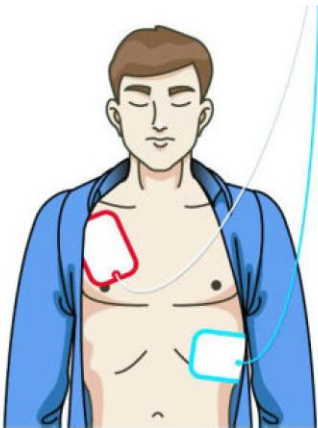


Fäst elektroderna på patienten enligt anvisningarna på elektrodförpackningen.

För en vuxen.

- Blå elektrodplacering: placera den blå elektroden som det blå området på bilden (under vänster bröstvårta).
- Röd elektrodplacering (bröstben): placera den röda elektroden som det röda området på bilden (under nyckelbenet).


För ett barn.

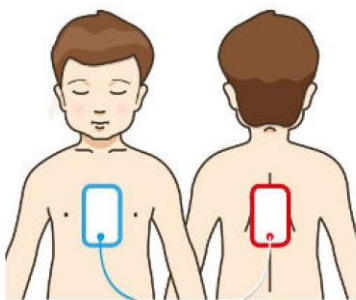

- Blå elektrodplacering: placera den blå elektroden som det blå området på bilden (på bröstorgens mittlinje).
- Röd elektrodplacering (bröstben): placera den röda elektroden som det röda området på bilden (på ryggens mittlinje)

») "Fäst elektroderna ordentligt på patientens bara bröstorg enligt anvisningarna på elektroderna."


## 6 Analysera hjärtrytmen

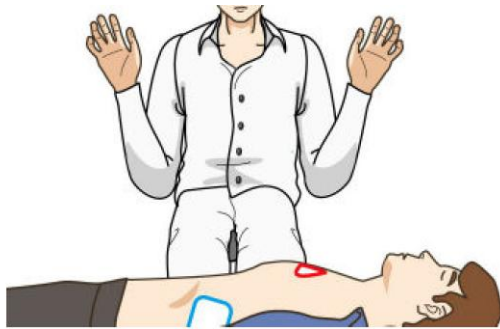

Rör inte vid patienten, vänta på hjärtrytmanalysen.

» » "Rör inte vid patienten. Analyserar hjärtrytmen."

## 7 Defibrillera

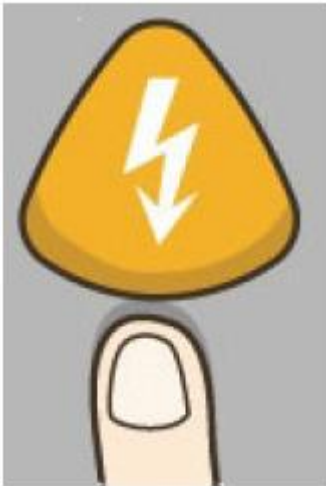


**Om stöt rekommenderas.** Tryck på stötknappen inom 30 sekunder.

» » "Stöt rekommenderas. Rör ej patienten. Tryck på den blinkande knappen."

**Om stöt INTE rekommenderas.** Gå till steg 8.

» » "Stöt rekommenderas ej."

## 8 Utför HLR

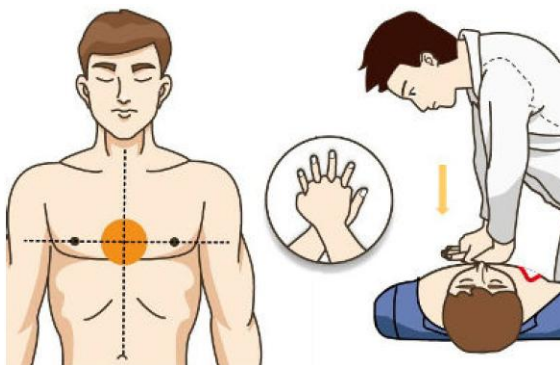

Utför hjärt-lungräddning enligt anvisningarna.

- Om HLR-tiden går ut upprepar du steg 6.
- Vänta tills ambulanspersonal kommer om patienten är vid medvetande och andas normalt.

# Mindray BeneHeart C1A



Mindray BeneHeart C1A är en robust och lättanvänd hjärtstartare som kan behandla både barn och vuxna. Tryck lägesomkopplaren åt höger eller vänster för att växla mellan barn- och vuxenläge.

Tvåspråkig Hjärtstartare

Röstinstruktioner vägleder användaren steg-före-steg. Med **språkknappen** kan du växla mellan två konfigurerade språk, primärt språk är alltid svenska. Även tydliga bilder visar användarflödet och elektrodplacering.

## TACK!

I år tackar vi Sparbanken Syd som är möjliggörare för några av våra projekt och idéer.